



RESCUE-SHEET (DRAP D'EVACUATION)

Chaque seconde compte quand un incendie éclate.

Le personnel et les services d'urgences doivent réagir d'une façon adéquate pour évacuer des patients avec des problèmes de mobilité; Le drap d'évacuation se trouve en dessous du matelas des lits dans l'hôpital ou le maison de repos, pour faciliter l'évacuation. Pendant des urgences il est possible pour un seul membre du personnel de mettre en sécurité le patient à l'aide du drap d'évacuation.





Le drap d'évacuation se trouve en permanence en dessous du matelas, avec les bandes rouges desserrées et avec les élastiques blancs attachés aux coins du matelas. Les bandes rouges ne peuvent pas se trouver sur le côté de la paroi.



Sortez pendant l'évacuation les bandes rouges et mettez les sur le lit. Attachez les bandes de l'autre côté du matelas. Serrez les bandes tellement fortes pour que le matelas remonte aux côtés.



Tirez la poignée au bord supérieur du matelas pour doucement laisser glisser le patient et le matelas du lit. Gardez la poignée fixée dans vos mains pour offrir la sécurité maximale au patient quand le matelas arrive au sol.



Le patient peut maintenant sortir de la chambre sur le matelas, par les escaliers, et dehors. Le matelas et la literie offre protection contre chocs et le froid.