



THEKLA MOBILISATIE- EN REVALIDATIESTOEL









Thekla

Mobilisatie- en
revalidatiestoel



**Uitgebreide combinatiemogelijkheden en
functionaliteiten met intelligente besturingssoftware**

VOORSTELLING

	
<p>De Thekla in rechte zitpositie met tafel voor actieve deelname aan dagelijkse activiteiten</p>	<p>Traploze zitposities ter ondersteuning van de longventilatie</p>
	
<p>Dankzij de geïntegreerde opstafunctie kan de patiënt gemakkelijker opstaan.</p>	<p>Rechtopstaande bedpositie met steungrepen, gevoerde hoofdsteen, veiligheidsbanden en multifunctionele rails.</p>
	
<p>De Thekla als horizontale ligbank op werkhoogte voor een optimale werkhouding; de arMLEUNINGEN gaan automatisch en volledig omlaag.</p>	<p>Trendelenburg-positie (hoofd omlaag) tot 16° instelbaar voor kleine ingrepen, shocktherapie en noodgevallen.</p>
	
<p>Krachtbesparend, veilige transfer van het bed naar de Thekla.</p>	<p>Veilig douchen op de Thekla met gevoerde douchematras in ontspannen positie, ook in nauwe ruimten.</p>



In de stapositie ondergaat de wervelkolom van de patiënt een zeer belangrijke axiale belasting. Dit is van belang voor de regeling van de tonus, de bevordering van de lichaamssymmetrie, de controle over de romp en de stimulering van het evenwicht en de waarneming. Als de patiënt regelmatig in deze stand wordt gezet, worden spitsvoeten en contracturen in de knie- en heupgewrichten voorkomen. De dagelijkse mobilisatie van een patiënt met het apallisch syndroom vermindert spasmen en draagt bij aan de instandhouding van de nierfunctie.-

VROEGE MOBILISATIE EN BEWEGINGSTHERAPIE BEHOREN TOT DE HOEKSTENEN VAN INTENSIEVE ZORG.

- Mobilisatie al tijdens de stabilisatiefase
- Mobilisatie ook nog tijdens de beademing
- Ondersteunt het werk van fysiotherapeuten
- Traploze, individuele instelling van de positie van de patiënt
- Geïntegreerde veiligheidsfunctie
- Veelvoorkomende posities zijn voorgeprogrammeerd
- Voorkeursposities kunnen in het geheugen opgeslagen en met één druk op de knop ingesteld worden
- Op de schaalverdelingen aan de zijkant kunnen de zithoek en de hellingshoek afgelezen worden
- Eenvoudige instelling via de handbediening






TOEPASSINGEN

- schedel- en hersentrauma
- apallisch syndroom
- beroerte
- overgewicht bij langdurig liggen
- polytrauma
- gecompliceerde breuken die slechts specifiek belast mogen worden

VOORDELEN:

- hoge rendabiliteit vanwege de combinatie van verschillende apparaten/functies
- optimale veiligheid van de patiënt
- stevige en stabiele constructie
- reanimatie bij alle toepassingen
- goede werkhouding
- werkt op een accu

ACCESSOIRES

		
<p>Nekrol In hoogte verstelbaar</p>	<p>Nek-orkussen In hoogte verstelbaar</p>	<p>Gevoerde hoofdsteun Met voorhoofds- en kinband, in hoogte verstelbaar</p>
		
<p>Tafel met groot, aan lichaamsvorm aangepast blad; kan op de armleuningen geklemd worden</p>	<p>Schaalverdelingen voor nauwkeurige positionering en multifunctionele rails voor de bevestiging van bijv. urinezakken</p>	<p>Beknopte gebruiksaanwijzing en opbergnet aan de achterkant van de stoel</p>
		
<p>Verlengde voetsteun waarop de gehele voet geplaatst kan worden</p>	<p>Voetsteun in 4 hoogtes instelbaar, opklapbaar en ook in opgeklapte stand vergrendelbaar</p>	<p>Gevoerde veiligheidsbanden in 2 breedtes en in 4 hoogtes instelbare steungrepen voor de stapositie</p>



TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal gewicht:	Patiënten tot 150 kg
Breedte:	Zit- en ligvlak 580 mm, max. buitenmaat 735 mm
Lengte:	Zitdiepte 490 mm, ligvlak 1900 mm, onderstel 1060 mm
Hoogte:	Zithoogte 550 mm, ligvlak 830 mm, stabel 1700 mm
Bekleding:	Schuurvast, moeilijk ontvlambaar, afwasbaar en desinfecteerbaar
Onderstel:	Schaalverdelingen voor hellings- en buigingshoek; stootranden; schuifgrepen aan bovenstel, hoofdeinde en achterkant van de rugleuning; opbergnet en beknopte gebruiksaanwijzing op de rugleuning; anatomisch gevormde en gevoerde armleuningen; voetsteun in 4 hoogtes instelbaar, opklapbaar en vergrendelbaar, 210 mm lang
Wielen:	Zwenkwielen met dubbele wielmontage, antistatisch met draadbeschermers, \varnothing 125 mm, drie wielen afrembaar, één wiel in bepaalde richting vergrendelbaar voor optimale sporing
Eigengewicht:	92 kg
Besturingseenheid:	Spatwaterbestendig, loodaccu met geïntegreerde oplader en beveiliging tegen overlading, handbediening met geheugen- en insteltoetsen voor voorkeursposities, veiligheidsstop voor stapositie bij 46°, bediening beveiligd door microprocessor.